


MASQUE SECURIMASK C1 – UNS 1

Port du masque : le masque doit être porté avec l'étiquette à l'intérieur et en bas

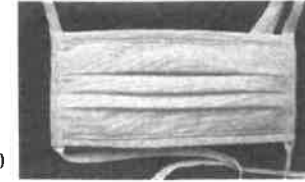

LOT :

(Photo non contractuelle)

Domaine d'utilisation : Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé **aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités** (hôtesses de caisses, agents des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Performances : Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020 – Rapport DGA RP 2143 - Mulliez-Flory du 16/04/2020. Masque Conforme au guide AFNOR SPEC S 76-001.

Masque catégorie 1 « UNS 1 » = masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.

Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa

Utilisation : le temps de port du masque est limité à 4 heures (Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins).

Recommandations de manipulation des masques :

- Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;



(Photos non contractuelles)

- Lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher ; ne pas déplacer le masque ;
- Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ;
- Si besoin de boire ou de manger, changer de masque ;
- Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique ;
- Pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; l'isoler dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver ; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Entretien du masque : après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Explication sur la méthode de lavage : Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique. Séchage en tambour. Le passage à 120°C max. Ce masque a été testé conforme à la catégorie 1 après 5 lavages.

Composition de la matière principale : Tissu extérieur : 100%CO - 155g/m² +/- 5% - Tissu intermédiaire : 100%PES +/-5% - 140g/m² - Tissu intérieur : 100%CO - 155g/m² +/-5%

Stockage : masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.



Route de Saint Aubin – Le Longeron – 49710 SEVREMOINE

Fin de vie : Si défectueux ou s'il est usagé (plus de 50 lavages), le laver une dernière fois et le placer soit dans un container avec les éléments à incinérer soit dans un bac de recyclage textile dédié pour ce type de produits (nous contacter pour le recyclage).

Contexte d'utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.